

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

OBSERVERA! Från april 2017 levereras Picolo förprogrammerad med;

- Inläst Auditiv feedback,
- Inlästa svarsmeddelanden,
- Gewa koder 00-15 aktiverade
- Slumpvis Gewa 4096 låskod inlagd. (enligt steg 1/2/3/4/11/12/13 i guiden nedan)

OBSERVERA IGEN! I och med att en låskod finns aktiverad ersätter denna knapp D på en Pico16-sändare, dvs behöver man ändra inställningar enligt manualen nedan så är sista steget D=Sparat – här trycker man för att spara då inte längre på D utan Dörrknappen (Pico16) eller knapp på tex Pico2 med rätt låskod inlagd.

Det rekommenderas att det första man gör är att se att rätt låskod finns inlagd på avsedd sändare.
* information om rätt låskod kan fås från HMC eller Picomed.*

Detta är en kompletterande förenklad manual för programmering av Picolo. För installation hänvisas till ursprunglig manual, fn på engelska och norska.

För IR-styrning av Picolo rekommenderas 2 olika standarder för IR-signaler enligt nedan. Picolo kan också användas med vilken IR-sändare som helst och man måste då lära in signal för signal men troligen får man en sämre tillförlitlighet än med färdiga format. Till detta hänvisas till den stora manualen på norska och engelska.

Rekommenderas:

- Picomed koder (aktiv som standard, User code 5, channel 00 (00-15)).
- Gewa GewaLink (förinställt nivå 1, GewaLink 00-15. Måste aktiveras enl. nedan)

För att programmera en Picolo krävs en IR-sändare med minst 18 knappar, tex en Pico16, men det går också att använda en sändare av annat fabrikat, tex Gewa Control Prog.

Nedanstående programmering görs med en Pico16. För mer ingående programmering hänvisas till den ursprungliga manualen, för närvarande på norska och engelska.

Steg 1-4 bör du utföra även om Picolo ska användas utan IR-sändare.

Steg 5-10 är justeringar av volym, tider mm. Som regel bra default-inställda.

Steg 11-14 gäller användning av IR-sändare för att styra Picolo

1. Spela in Auditiv feedback, nr och menyval

(Detta är inte helt nödvändigt men förenklar väsentligt under programmering framöver)

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **31**, sedan håll inne **F** medan du säger "Noll" (0), släpp sedan **F**. Inspelningen spelas upp för dig.

Tryck **A** för att lyssna igen. För att spela in (0) igen; Tryck och håll **F** som ovan.

För att spela in nästa nummer, tryck **B**.

håll inne **F** medan du säger "Ett" (1), släpp sedan **F**. Inspelningen spelas upp för dig

Som tidigare, tryck **B** för att fortsätta.

Upprepa processen för **2 till 9, *, #, Tom, Sparat, Fel, Paus**

Tryck **D** för att **spara inspelning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

2. För att aktivera Auditiv feedback (nr, sparat osv)

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **04** sedan **1**

Tryck **D** för att **spara inspelning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

3. För att spela in Inspelade röstmeddelanden

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **21** sedan tryck och håll **F** medan du säger "Hej, vem är det?" släpp sedan **F**

Tryck **22** sedan tryck och håll **F** medan du säger "Välkommen in, jag öppnar" släpp sedan **F**

Tryck **23** sedan tryck och håll **F** medan du säger "Nej tack, inga besök" släpp sedan **F**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

4. För att ange när ett visst röstmeddelande ska användas

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Pico till den piper, 3s.

Tryck **26** sedan tryck **1** (för att använda meddelande 21 vid svara porttelefon).

Tryck **D** för att spara

Tryck **27** sedan tryck **2** (för att använda meddelande 22 för att öppna lås/dörr).

Tryck **D** för att spara

Tryck **28** sedan tryck **3** (för att använda meddelande 23 för att avvisa person vid dörren, porttelefon).

Tryck **D** för att **spara**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

5. Ställ in antal sekunder innan Autosvar går in

Exempelvärde 10 sekunder (default = 5s)

Autosvar är en funktion som svarar automatiskt efter en viss tid, tex om användaren tillfälligt har svårt att styra Pico. Man kan då ändå få reda på vem som ringer på men för att släppa in någon krävs att användaren kan trycka på någon knapp. Autosvar av/på kan manövreras direkt på Pico, via IR eller via manöverkontakt (se nedan).

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Pico till den piper, 3s.

Tryck **02** sedan tryck **10**

Tryck **D** för att **spara inställning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

6. Ställ in antal sekunder för öppen talkommunikation med dörrenheten

Exempelvärde 30 sekunder (default = 45s). Värdet kan vara 6-99s.

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Pico till den piper, 3s.

Tryck **05** sedan tryck **30**

Tryck **D** för att **spara inställning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

Picomed AB, Skansgatan 9, 97253 Luleå.

www.picomed.se

0920-281267

post@picomed.se

7. Ställ in volym på ringsignal

Exempelvärde volym 5 (default = 3, 0 = tyst)

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **33** sedan tryck **3**

Tryck **D** för att **spara inställning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

8. Ställ in användning av uttag nr 3 för manöverkontakt; Autosvar

För att manöverkontakten ska slå av och på Autosvar:

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **17** sedan tryck **15**

Tryck **D** för att **spara inställning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

9. Ställ in användning av uttag nr 3 för manöverkontakt; Headset

För att manöverkontakten ska slå av och på ansluten Mic och högtalare (alt. PC-headset):

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **17** sedan tryck **16**

Tryck **D** för att **spara inställning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

10. För att ändra samtalsvolym (med dörrenheten)

Svara med dörrknappen (eller D på sändare) så att samtal öppnas med dörrenheten. Tryck upprepat på **F** för att justera upp volymen i fem steg. Varje steg indikeras med ett pip och maxvolym (5) indikeras med långt pip. Sedan börjar den om från lägsta volym. Volymen sparas.

11. Ställ in Picophone för GEWALink koder

För att använda en sändare med GewaLink (en Pico16 med GewaLink 00-15 på en nivå, alt. en Gewa sändare med fabriksinställd nivå 1 (GL00-GL15):

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Pico till den piper, 3s.

Tryck **11** sedan **1** och sedan **1** igen för att låta Pico acceptera Gewa Link

Tryck **D** för att **spara inställning**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

12. För att Ange en Låskod (IR) för låsöppning

Det är lämpligt att använda en sk Låskod (av Gewa kallad 4096-kod) för funktionen svara porttelefon/låsöppning, så att ingen obehörig med tillgång till Pico eller gewa-sändare kan öppna dörren med standardkanalerna.

"Hitta på" en kod mellan värde 0000 och 4095. I exemplet **2647** (eller **0039**)

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Pico till den piper, 3s.

Tryck **15** sedan tryck **2, 6, 4, 7** (för kod tex. **0039**, tryck **15** sedan tryck **39**)

Tryck **D** för att **spara**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

13. För att Aktivera att Låskod (IR) för låsöppning ska användas UTFÖR INTE DENNA AKTIVERING UTAN ATT HA TILLGÅNG TILL EN SÄNDARE DÄR DU KÄNNER TILL LÅSKODEN – DEN ERSÄTTER KNAPP D!

Låskod blir nu aktiverad som ersättning för knapp D (eller motsv knapp B på Gewa-sändare) och dörrknappen på Picolo.

OBSERVERA! Då knapp D som normalt styr dörrknappen på Picolo används för att spara alla inställningar som görs på Picolo, måste nu en kodad låssignal användas som knapp D (tex 2647 enl ovan) vid programmering. Du kan alltså inte utföra inställningar på Picolo med en annan sändare (utan rätt låskod).

DET REKOMMENDERAS ATT LÅSKODEN DOKUMENTERAS ALT. NOTERAS TEX BAKOM PICOLO. Detta för att man i efterhand ska kunna programmera Picolo med en annan sändare utan att behöva börja om från början med fabriksinställning.

Tryck **0** sedan **F**



Håll ner Autosvar-knappen på Picolo tills den piper, 3s.

Tryck **14** sedan tryck **1** (eller tryck **0** för att avaktivera låskod)

Tryck **D** för att **spara**

Tryck **E** för att **gå ur programmering**

14. För att byta nivå för Gewa IR-signaler på Pico

Grundinställt används Picomed koder grupp 5 samt Gewa motsvarande nivå 1 (om Gewalink aktiverat). Används redan dessa till annat av brukaren kan man byta nivå att använda med Pico.

Tryck **0** sedan **F**



Håll nere knapp för Autosvar på Pico tills den piper.

TRyck **13** sedan tryck **1** (för default nivå), ELLER tryck **2** för nivå 2, ELLER tryck **3** för nivå 3, ELLER tryck **4** för nivå 4)

Nedanstående visar motsvarande knapp på en Pico sändare resp olika nivåer på en Gewa-sändare:

Level 1 (0)			Level 2 (1)			Level 3 (2)			Level 4 (3)		
Gewalink Code	Gewa device	Picomed	Gewalink Code	Gewa device	Picomed	Gewalink Code	Gewa device	Picomed	Gewalink Code	Gewa device	Picomed
0	1	1	16	1	1	32	1	1	48	1	1
1	2	2	17	2	2	33	2	2	49	2	2
2	3	3	18	3	3	34	3	3	50	3	3
3	4	4	19	4	4	35	4	4	51	4	4
4	5	5	20	5	5	36	5	5	52	5	5
5	6	6	21	6	6	37	6	6	53	6	6
6	7	7	22	7	7	38	7	7	54	7	7
7	8	8	23	8	8	39	8	8	55	8	8
8	9	9	24	9	9	40	9	9	56	9	9
9	0	0	25	0	0	41	0	0	57	0	0
10	*	A *	26	*	A *	42	*	A *	58	*	A *
11	#	B #	27	#	B #	43	#	B #	59	#	B #
12	A	C	28	A	C	44	A	C	60	A	C
13	B	D	29	B	D	45	B	D	61	B	D
14	C	E	30	C	E	46	C	E	62	C	E
15	D	F	31	D	F	47	D	F	63	D	F

Funktioner på en nivå på Pico16 med Brukargrupp 05:

(och motsv. Gewa signal på nivå 1)

1 Gewalink 0	2 Gewalink 1	3 Gewalink 2
4 Gewalink 3	5 Gewalink 4	6 Gewalink 5
7 Gewalink 6	8 Gewalink 7	9 Gewalink 8
A * Gewalink 10	0 Gewalink 9	B # Gewalink 11
C (on hook dial) Gewalink 12	D (door) Gewalink 13	E (hook) Gewalink 14
	F (Volume / autoanswer) Gewalink 15	

15. För att återställa Picolo till fabriksinställning

(Till detta behövs ingen IR-sändare)



Håll nere knappen för Autosvar på **Picolo**. Lysdiod för funktion visas som vanligt. **Fortsätt hålla ner knappen** medan du **snabbt** utför följande steg.

Tryck **Dörrknapp** en gång

Tryck 3ggr **Kryssdörrknapp(Picolo) / Telefonknapp (picocombi+Picophone)**

Tryck 3ggr **Dörrknapp**

Släpp knappen för Autosvar. Lysdiod för funktion ska börja trippelblinka. Du ska höra Pip-pip-pip som bekräftar att du är i rätt inställningsläge.

För att **starta återställningen**: tryck Knapp för Autosvar så börjar återställningen, om knappen inte släpps direkt utan hålls inne 3s kommer även steg 2 (radera alla inspelade röstmeddelanden) att utföras.

Återställningen tar ca 5s. Ett långt Piip ska höras som bekräftar utförd återställning.

Max tid för de första 5 stegen är 8s. Max tid för resterade steg är 8s.

Bruksanvisning för slutanvändare av Picolo Porttelefon

Svara när det ringer på dörren:

- Tryck **D** på IR-sändaren
ELLER
Tryck på **Dörrknapp** på Picolo
- För att släppa in, Tryck **D** eller dörrknapp igen
- För att neka insläpp, Tryck **E** eller **Telefonlursknapp**
- Picolo stänger själv av samtal med dörrenheten efter 45s (tid kan ändras)
Man kan stänga samtalet själv med knapp **E** på sändaren

Ändra samtalsvolym:

- Tryck upprepat på **F** på sändaren
Ett långt piip betyder max volym.
Volyminställningen sparas till nästa gång.

Autosvar:

- Autosvar kan slås på och av med **F** på sändaren eller med Autosvar-knappen (hand) på Picolo
- En gul lampa är tänd vid Autosvar-knappen om Autosvar påslaget
- Picolo svarar själv 5s efter dörr-ringning
- Picolo stänger själv av samtal med dörrenheten efter 45s (tid kan ändras)
Man kan stänga samtalet själv med knapp **E** på sändaren
- Autosvar kan aldrig automatiskt öppna dörren