



Snabb Guide

1 VÄLJ MAT

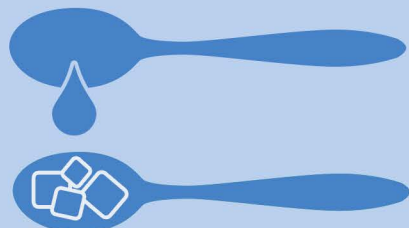


Vätskor: soppor, flingor, drycker
Halvfast föda: havregrynsgröt, potatismos, puddingar
Fast föda: frukt, grönsaker, kött

2 FÖRBEREDA MAT

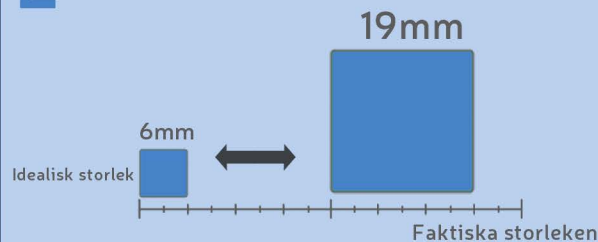

Obi fungerar bäst när maten är förberedd i ovan intervall.


3 FYLL PÅ MED MAT

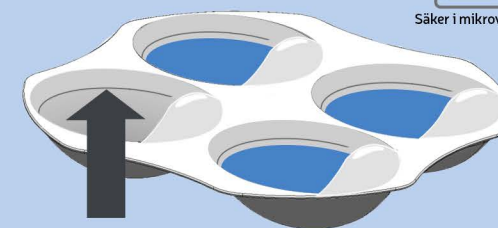

Max fyllning


Fyll skålarna med mat. Överfyllning rekommenderas ej.

4 SÄTT I MANÖVERKONTAKTER

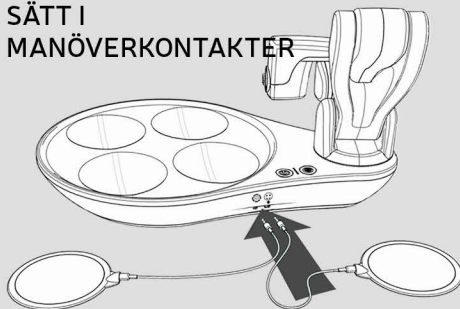


Placera enheten på en stationär, torr och horisontell yta.
För armen till höger så som visas på bilden.
Sätt i medföljande manöverkontakter.

5 PLACERA TALLRIK & TALLRIKUNDERLÄGG

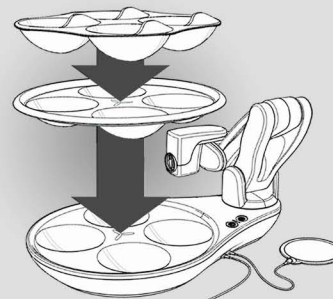


Rengör Tallrik och Sked innan användning.
Placera först det färgade underlägget och sedan tallriken

6 FÄST SKEDEN

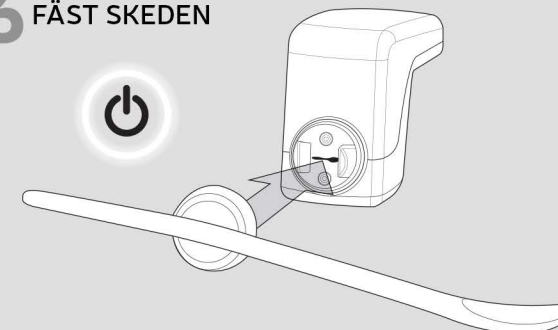


Fäst skeden och tryck därefter på On knappen.

7 GÅ IN I INLÄRNINGSLÄGE

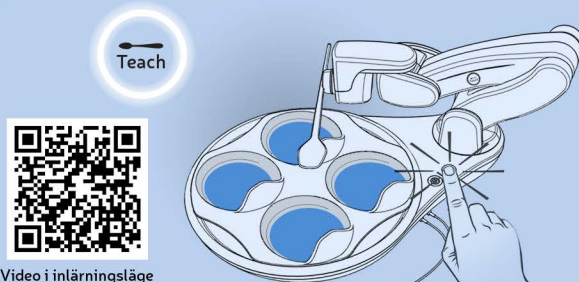


Placera användare i upprätt position framför Obi och tryck därefter på inlärningsknappen (Teach).

8 BESTÄM SKEDENS PLATS

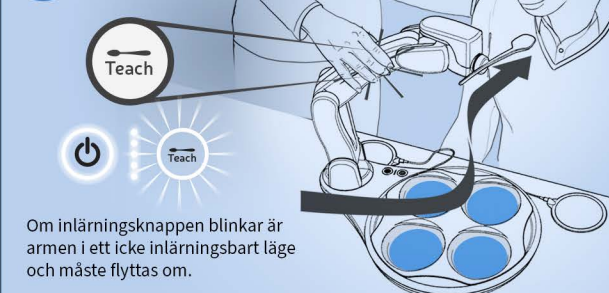

Ta tag i armen med tummen över "Teach" ikonen. Lyft och vrid armen för att placera skeden framför användarens mun.
⚠ VARNING: RISK FÖR KVÄVNING. Lär inte ut en leverans position inuti munnen.

9 AVSLUTA INLÄRNINGSLÄGET

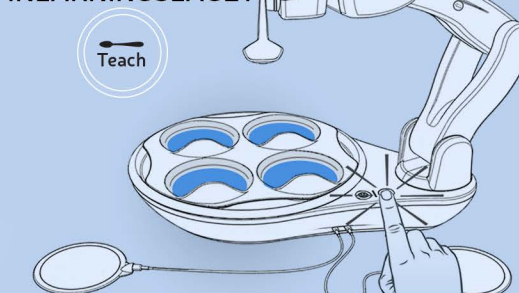


Tryck på "Teach" knappen igen för att spara positioneringen.

Snabb Guide


ÄTA

1 VÄLJA MAT

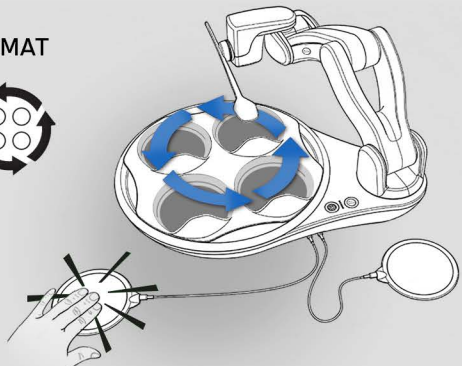


Tryck på välja knappen för att flytta skeden en skål moturs.

2 LEVERERA MAT

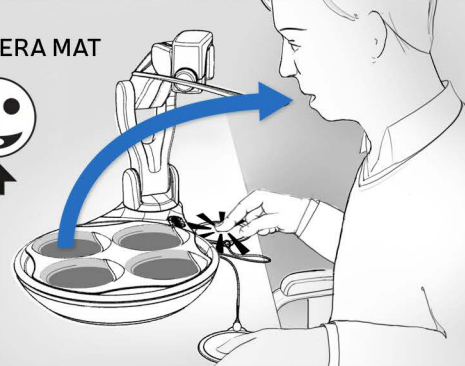


Tryck på leverans knappen för att ta mat på skeden och därefter transportera maten till vald position.

3 ÅTERGÅ MED ARM

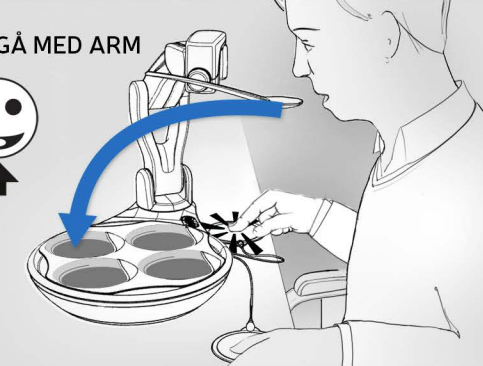


Tryck på leverera knappen för att återgå med skeden till skålen.

RENGÖRING

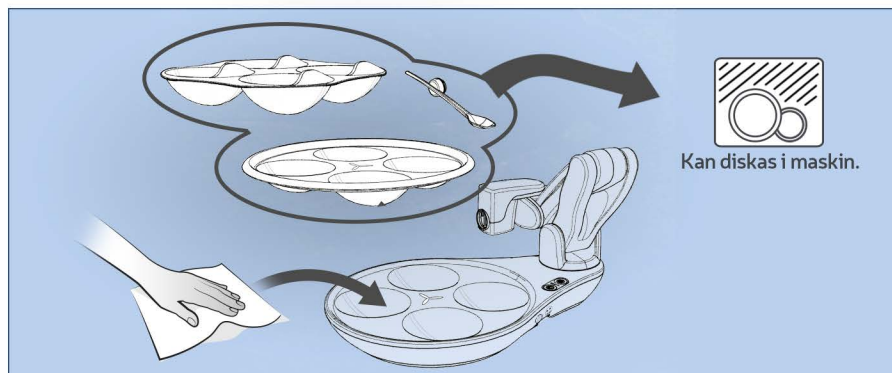


Rengör tallriken, tabletten och skeden i en diskbänk eller diskmaskin (överst).
Rengör Obi och dess arm med en desinfektionsservett.

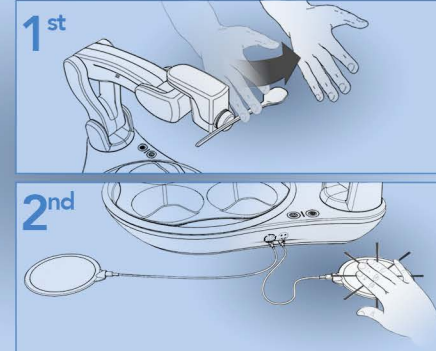

Om strömbrytaren blinkar, ta bort det hindrande föremålet. När det är borttaget, tryck på någon av kontaktarna för att armen ska återuppta sin rörelse.

KOLLISION

LADDNING

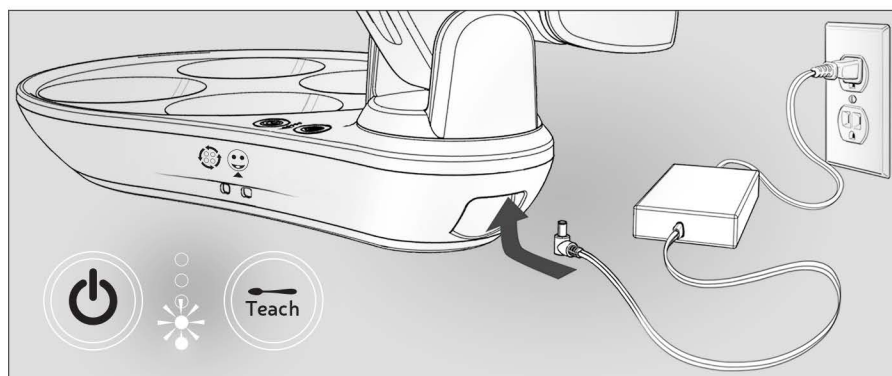

Anslut laddningskabeln till Obi's laddningsport och till ett eluttag. Alla batteriets indikator lampor kommer att tändas upp när enheten är fulladdad.



Vid eventuella problem med Obi maila: info@picomed.se eller ring 08-2112030

SERVICE