



## 1828570 – Pico Voicebox 18

# Rekonditionering

## Rengöring av din Pico Voicebox 18

- Headset kan rengöras med Micro fiber-trasa
- Pico Voicebox 18 kan regelbundet rengöras med antibakteriell servett, alternativt alkoholbaserad rengöringsduk.
- Spraya inte rengöringsmedel av något slag direkt på din Pico Voicebox
- Doppa inte Pico Voicebox i vätska
- Tvätta eller (vid rekonditionering) byt ut eventuell rem eller mjuk väska
- Byt ut mikrofonskydd vid behov

## Funktionskontroll av din Pico Voicebox 18

- Testa att laddare fungerar
- Testa att headset och röstförstärkare är ihop kopplade
- Ladda röstförstärkare samt headset
- Kolla så att klistermärket för instruktion av ljudjustering sitter kvar på röstförstärkaren

## Återvinning av din Pico Voicebox 18

- Pico Voicebox ska lämnas för återvinning enligt de lokala krav som finns för elektronik med Litiumbatterier.
- Pico Voicebox kan också skickas till *Picomed AB, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö* tillsammans med information om att den ska kasseras.

## Reparation

- Pico Voicebox får inte skruvas isär utan att ha kontaktat Picomed.
- Garanti gäller i 2 år med begränsningar för garanti av batteri.
- Kontakta Picomed vid batteribyte, vissa modeller behöver inte skickas in för byte
- Reparationer skickas med fel beskrivning till:  
Picomed AB Lagerhotellet, Konsumentvägen 8A, 12530 Älvsjö

## Lagerhållning

- Lagras i rumstemperatur
- Optimalt ska batterier lagras med ca 40-50% laddning. Alla batterier har viss självurladdning och behöver underhållsladdas regelbundet. Fulladdat batteri är också acceptabelt.  
Låt ALDRIG ett batteri laddas ur helt, det kan tappa mycket effekt och kanske aldrig går att ladda igen.

## Vad ingår vid leverans:

1. Röstförstärkare
2. Trådlöst headset (mikrofon)
3. Laddare med två USB portar
4. Två USB ladd sladdar
5. Bärrem
6. Manual
7. Väska

**Manuell ihopparning:**

- Steg 1. Starta Röstförstärkare, håll nere "M"-knappen i 5 sekunder, röstförstärkaren säger "UHF Waiting for connection".
- Steg 2. Starta den trådlösa mikrofonen och håll inne ihoppnings knappen "📶" i 5 sekunder. Röstförstärkaren bekräftar genom att säga "UHF is connected".

**Felsökning:**

**Allt är påslaget, men förstärkaren ger inget ljud.**

**Allt är påslaget, men förstärkaren ger inget ljud.**

1. Håll nere "🔊" i 10s för att återställa högtalaren, slå sedan på den igen. Röstförstärkaren startar alltid på en standardvolym.
2. Gör en manuell ihopparning (se föregående sida)
3. Finns flera röstförstärkare i samma lokaler, då kan man behöva byta kanal. Se "2. Ihopparnings knapp "M":" på sida 2.

**Överensstämmer med:**

CE, EMC, RED, RoHS

