

jabbla
We all have a voice



Vibe 12⁺

Bruksanvisning

© Copyright Jabbla

Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, överföras, transkriberas eller lagras på automatiska informationslagringssystem, översättas till något språk eller datorspråk i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan ett i föregående skriftligt medgivande från Jabbla.

Det här dokumentet är en översättning av den engelska bruksanvisningen. Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på holländska.

Version 20240423

Innehållsförteckning

A	Inledning	3
1	Inledning.....	3
2	Avsedd användning.....	3
3	Förbjuden användning.....	3
4	Livslängd.....	3
5	Identifieringsskylten på enheten.....	3
6	Tekniska data.....	4
B	Beskrivning och användning	6
1	Presentation av Vibe 12 ⁺	6
2	Alternativ.....	8
3	Användning.....	8
4	Skärm.....	8
C	Säkerhet	9
1	Säkerhet.....	9
D	Komma igång	10
1	Vad finns i förpackningen?.....	10
2	Användning första gången.....	10
3	Förvara enheten under en längre period.....	10
E	Styrning	11
1	Starta enheten.....	11
2	Ladda enheten.....	11
3	Visa strömstatus.....	12
4	Styrningsalternativ.....	12
4.1	Pekskärmsstyrning.....	12
4.2	Musstyrning.....	12
4.3	Joystickstyrning.....	13
4.4	Skanningskontroll.....	13
4.5	Tangentbordsstyrning.....	14
4.6	Använda skärmtangentbordet.....	14
5	Omgivningskontroll.....	15
6	Ringa och skicka/ta emot textmeddelanden.....	15
7	Försätta enheten i strömsparkläge.....	15
8	Väcka enheten från strömsparkläge.....	16
9	Återställa den bakre andra skärmen och högtalare.....	16
10	Återställa enheten helt.....	17
11	Stänga av enheten.....	17
F	Inställningar	18
1	Ställa in volymen.....	18
2	Windows 11 inställningar.....	18
2.1	Windows 11-inställningar via aktivitetsfältet.....	18
2.2	Windows 11-inställningar via Windows 11 Startknapp.....	19

2.3	Windows 11 inställningar för strömsparläge.....	19
3	Inaktivera strömsparläge.....	19
4	Ställa in knappen på enhetens baksida.....	19
5	Att välja språk för verktyget.....	20
6	Ställa in omkopplarna.....	20
7	Inställningar för väckning från strömsparläge genom pekning.....	20
8	Slå på eller av högtalarna.....	20
9	Slå på eller av hörlurarna.....	20
G	Underhåll och felsökning.....	21
1	Underhåll.....	21
1.1	Reparationer.....	21
1.2	Rengöra enheten.....	21
2	Felsökning.....	21
2.1	Hitta enhetens serienummer.....	21
2.2	Frågor om versionsinformation.....	21
2.3	Visa licensinformation för Mind Express.....	21
2.4	Felsökning.....	22
2.5	Testa kontakterna.....	22
2.6	Testa väckningssensorn.....	23
H	Avveckling och kassering.....	24
1	Avveckling.....	24
2	Kassering.....	24
	Index.....	25

A Inledning

1 Inledning



OBSERVERA

Läs denna användarmanual noga och spara den för senare användning.

Vibe 12⁺ är en mångsidig symbolisk kommunikationsenhet baserad på det grafiska kommunikationsprogrammet Mind Express. Vibe 12⁺ kör på operativsystemet Windows 11.



SPETS

Om du inte är van vid Windows 11 föreslår vi att du enbart utför de åtgärder som beskrivs i denna användarhandbok och i Mind Express-programmets användarhandbok.

För optimal användning av enheten rekommenderar vi att du läser denna användarhandbok noggrant innan du använder enheten. Grundläggande kännedom om programmet Mind Express rekommenderas också. Användarhandboken hänvisar regelbundet till användningen av Mind Express.

2 Avsedd användning

Enheten har en funktion för kommunikationsstöd. Den här enheten är avsedd att användas i vardagen av personer med kommunikationssvårigheter (som inte kan tala eller inte kan tala tydligt). Användare måste ha adekvat motorisk och kognitiv förmåga för att använda enheten.

Enheten är avsedd för användning inomhus och utomhus.

3 Förbjuden användning

Enheten kan inte användas för kliniskt, terapeutiskt eller i diagnostiskt syfte.

Enheten kan inte användas för andra syften än de som anges i dess avsedda användning.


Inga ändringar får göras på enheten utan att du rådfrågar och får tillstånd från Jabbla. Att genomföra ändringar på enheten kan få konsekvenser för säkerheten, garantin och överensstämmelsen med föreskrifter.

4 Livslängd

Enhetens förväntade livslängd är 5 år. Batteriets kvalitet och livslängd beror på användning.

5 Identifieringsskylten på enheten

Du hittar etiketten med enhetens serienummer på enhetens bakre panel.

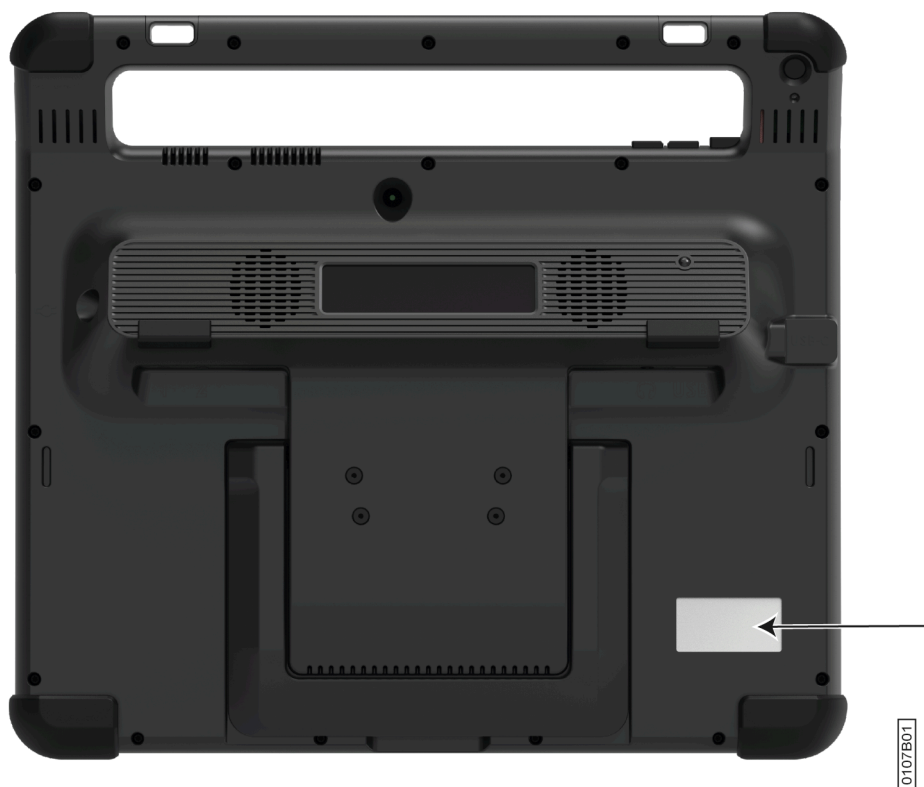

Figur 1. Plats för identifieringsskylten



Figur 2. Identifieringsskylt


6 Tekniska data

Specifikation	Förklaring
Processor	Intel® Core i5
Operativsystem	Windows 11 Pro
Hårddisk	256 GB SSD
Internt minne	8 GB
Pekskärm	<ul style="list-style-type: none"> • 13-tums kapacitiv pekskärm • Upplösning: 2 880 x 1 920 • Gorilla® Glass 5

Specifikation	Förklaring
Andra skärm	<ul style="list-style-type: none"> • 3,12 tum • OLED • Upplösning: 256 x 64
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB-2.0 A (200 mA) • 1 x USB-C (USB 4/Thunderbolt 4)
Batteri	Standardlitiumpolymerbatteri, 48 W
Batterikapacitet	1 dag vid normal användning och med standardinställningar Batterikapaciteten varierar avsevärt beroende på inställningarna, användning och andra faktorer.
Vikt	1 600 g (3,53 lbs)
Mått	<ul style="list-style-type: none"> • Höjd: 275 mm (10,83 tum) • Bredd: 310 mm (12,20 tum) • Djup: 20–45 mm (0,79–1,77 tum)
Webbkamera	<ul style="list-style-type: none"> • Fram: 5 MP • Bak: 10 MP
Montering	Monteringsplatta för REHADAPT-monteringssystem eller DAESSY-monteringssystem.
Anslutbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 • Bluetooth BT 5.1
Ljud	<ul style="list-style-type: none"> • 1 inbyggd mikrofon • 2 inbyggda högtalare
Nätadapter	15 Volt – 65 W

B Beskrivning och användning

1 Presentation av Vibe 12⁺

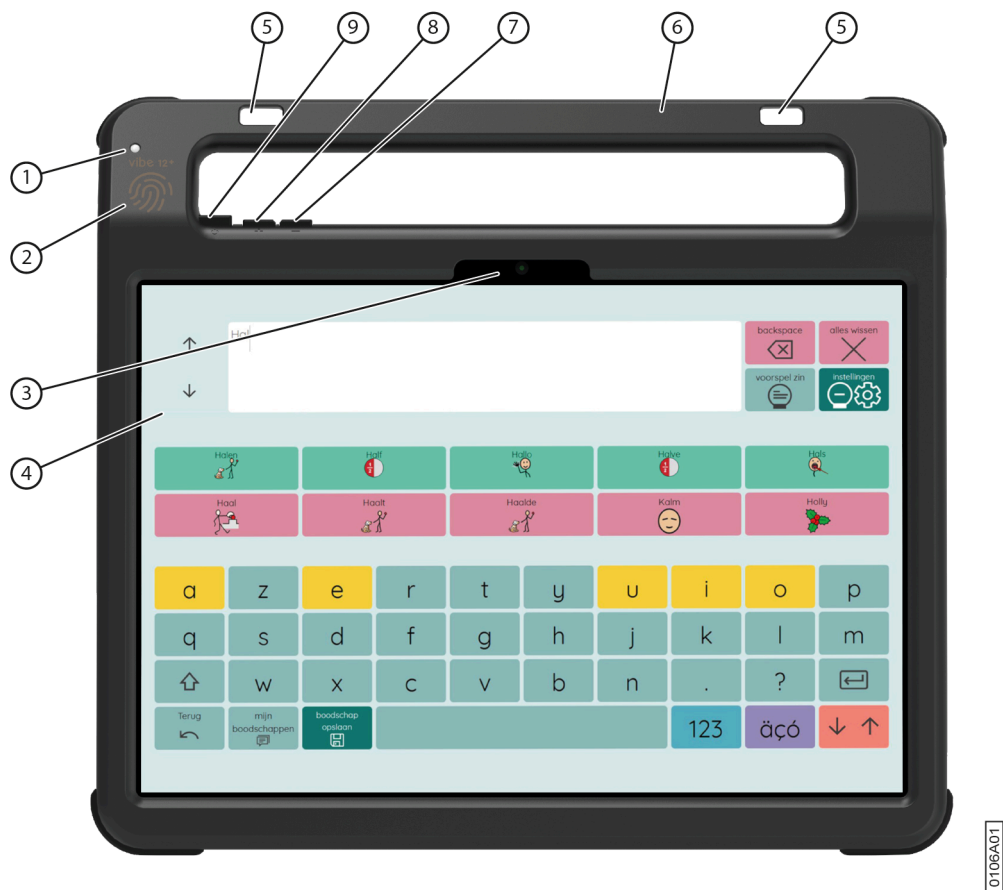


0106A01

Figur 3. Vy framifrån

Nr.	Identifisering	Förklaring
1	Infraröd mottagare	Med den infraröda mottagaren kan du lära enheten infraröda koder.
2	Väckningssensor	Du väcker enheten från strömsparläge genom att beröra platsen för denna sensor med din tumme eller finger.
3	Främre webbkamera	Enheten har en främre kamera som gör det möjligt att ta kort och spela in video.
4	Pekskärm	Enheten har en 13-tums kapacitiv pekskärm. Se Skärm på sidan 8.
5	Fästhål för stropp	Den medföljande stropen kan fästas här så att du bekvämt kan bära enheten.
6	Handtag	Massivt handtag med öppning för att fästa en rem.
7	Volymknapp -	Du kan minska volymen med den här volymkontrollen. Se Ställa in volymen på sidan 18.
8	Volymknapp +	Du kan öka volymen med den här volymkontrollen. Se Ställa in volymen på sidan 18.

Nr.	Identifiering	Förklaring
9	Strömbrytare	Slår på enheten eller går till strömsparläget.

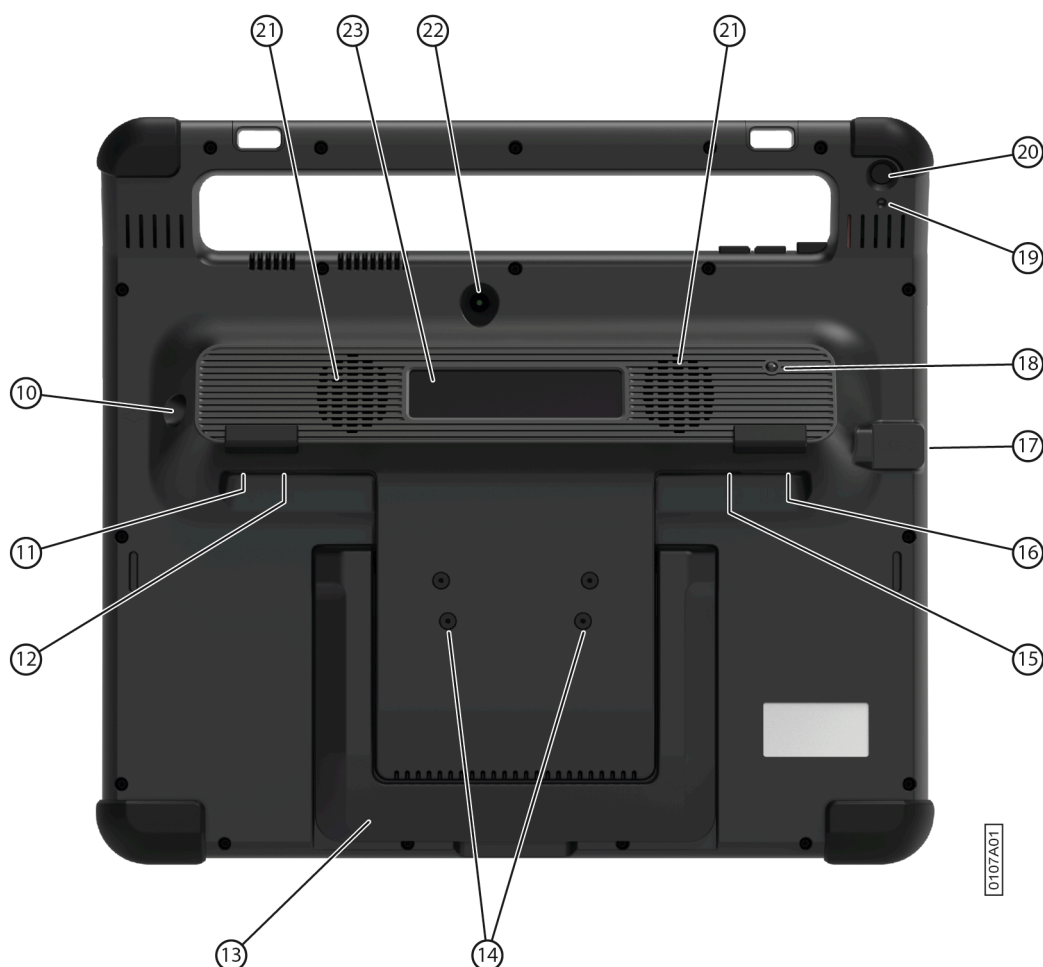

Figur 4. Vy från baksidan

Nr.	Identifiering	Förklaring
10	Strömförsörjning	Du kan ladda enheten med den här anslutningen.
11	Anslutning för kontakt 1	Denna ingång är för anslutning av kontakt 1 Anslut enbart en icke strömförsörd kontakt utan spänning direkt till enheten!
12	Anslutning för kontakt 2	Denna ingång är för anslutning av kontakt 2 Anslut enbart en icke strömförsörd kontakt utan spänning direkt till enheten!
13	Brickstativ	Enheten har ett stativ som kan fällas ut. Stativet är konstruerat så att enheten kan stödjas ergonomiskt på en bricka.
14	Monteringshål för monteringsplatta	Du kan fästa en monteringsplatta för REHADAPT-monteringssystemet här. Du kan även fästa en monteringsplatta för DAESSY-monteringssystemet.
15	Hörlursuttag	Det här uttaget används för anslutning av hörlurar till enheten. Högtalarna stängs inte av automatiskt när du ansluter hörlurarna. Hörlurar och högtalare styrs genom programvaran.

Nr.	Identifiering	Förklaring
16	USB A-port (2.0)	Du kan ansluta kringutrustning genom USB A-porten (max 200 mA).
17	USB-C-port (USB 4/Thunderbolt 4)	Du kan ansluta kringutrustning via USB-C-porten.
18	Infraröd sändare	Med den infraröda sändaren kan du sända infraröda signaler till andra enheter som: ljudsystem och TV-apparater.
19	Återställ	Den här knappen används till att återställa den andra skärmen och högtalarna.
20	Escape	Den här knappen används till att: <ul style="list-style-type: none"> • Stoppa allt tal/ljud • Visa titelfältet och menyfältet i Mind Express • Stoppa skanning i Mind Express • För att aktivera en högerklickning nästa gång du vidrör skärmen.
21	Högtalare	Enheten har två kraftfulla högtalare.
22	Bakre webbkamera	Enheten har en bakre kamera som gör det möjligt att ta kort.
23	Andra skärm	Enheten är utrustad med en andra skärm som text kan visas på.

2 Alternativ

Enheten kan levereras med ett valfritt REHADAPT-monteringssystem eller ett DAESSY-monteringssystem.

3 Användning

Vibe 12⁺ är en mångsidig kommunikationsenhet baserad på kommunikationsprogrammet Mind Express. Tack vare Mind Express går det att skapa röstmeddelanden genom att välja bilder och/eller symboler. Val görs med:

- Pekskärm
- Tangentbord
- (Anpassad) mus
- Kontakt(er)

Vibe 12⁺ har en ljusstark pekskärm med hög upplösning.

Vibe 12⁺ kör på operativsystemet Windows 11.



SPETS

Om du inte är van vid Windows 11 föreslår vi att du enbart utför de åtgärder som beskrivs i denna användarhandbok och i Mind Express-programmets användarhandbok.

4 Skärm

Den kapacitiva pekskärmen kan styras:

- med dina fingrar
- med en (kapacitiv) penna som stimulerar dina fingrar (finns hos specialiståterförsäljare eller webbutiker)

C Säkerhet

1 Säkerhet

**OBSERVERA**

Se till att enheten sitter fast ordentligt och är fastlåst när du monterar enheten på en rullstol, så att den inte kan råka ramla av vid en stöt eller knuff.

**MILJÖ**

Enheten använder ett litiumpolymerbatteri. Se till att enheten bortskaffas på ett säkert sätt. Observera de regler för avfallshantering som gäller i ditt område.

**ANMÄRKNING**

Förvara enheten med halvfullt batteri om du inte tänker använda enheten under en längre tidsperiod. Se till att enheten är avstängd.

**OBSERVERA**

Undvik att placera enheten nära värmekällor eller på platser som kan bli mycket varma. På sommaren kan det till exempel bli mycket varmt i en bil. Höga temperaturer kan påverka batteriets livslängdsprestanda negativt.

**OBSERVERA**

Enheten är inte vattentät. Försök alltid att undvika situationer som kan orsaka att fukt eller smuts kommer in i enhetens öppningar. Var försiktig när du rengör enheten och följ alltid rengöringsanvisningarna.

**OBSERVERA**

Använd inte bordsstativet som ett bärhandtag! Om bordsstativet används som ett bärhandtag kan stativet lossna från enheten, vilket leder till att enheten ramlar och kan bli skadad.

Enheten är utrustad med Wi-Fi och Bluetooth. Var god följ dessa säkerhetsåtgärder:

**OBSERVERA**

Använd inte enheten på ett flygplan. Stäng av enheten eller sätt den i flygläge.

**OBSERVERA**

Använd inte enheten på sjukhus i närheten av elektronisk medicinsk utrustning. De radiovågor som utsänds kan påverka utrustningen.

**OBSERVERA**

Använd inte enheten i en miljö där det finns brännbara gaser (som bensinstationer).

D Komma igång

1 Vad finns i förpackningen?

Enheten levereras med följande delar:

- Nätadapter med kontakt och kabel
- Tangentbord (medföljer inte i vissa länder)
- Mus
- USB-minne
- Bärväska
- Rem
- Mind Express webblicens

2 Användning första gången

När enheten levereras är den redan tillräckligt laddad. En laddningsstatus mellan 40 % och 90 % ökar batteriets livslängd.



Figur 5. Strömbrytaren

Starta enheten. Tryck på och håll ned strömbrytaren (9) i flera sekunder. Enheten är redo att användas när Mind Express har startat helt.

3 Förvara enheten under en längre period

1. Ladda enheten till ca 50 %.
2. Stäng av enheten.



ANMÄRKNING

Enheten får inte vara i strömsparkläge.

3. Förvara enheten på en torr plats i rumstemperatur (20 °C).
4. Ladda batteriet var 3:e månad till ca 50 %.
Om du låter batteriet bli tomt kommer enheten inte längre att starta.

E Styrning

1 Starta enheten



Figur 6. Strömbrytaren

Tryck på och håll ned strömbrytaren (9) i flera sekunder.

Om enheten var i standbyläge går den att använda direkt. Om enheten öppnas från nedstängningsläget är den redo att användas när Mind Express har startat helt.

2 Ladda enheten

Hur länge du kan använda din enhet innan den behöver laddas beror framför allt på hur du använder den:

- ljudvolymen
- Hur lång tid som är inställd innan den går in i strömsparläge
- din Bluetooth- och Wi-Fi-användning

Om enheten används ofta rekommenderar vi att du laddar den dagligen. Ladda endast enheten med den medföljande nätadaptorn. Det går fortfarande att använda enheten när den laddas. En laddningsstatus mellan 40 % och 90 % ökar batteriets livslängd.

Ladda helst batteriet i rumstemperatur (ca 20 °C/68 °F). Temperaturer lägre än 5 °C och högre än 45 °C kan påverka batteriet negativt.




Figur 7. Anslutning för att ladda samtalsapparaten

1. Kontrollera strömstatus. Se [Visa strömstatus](#) på sidan 12.
2. Anslut nätadaptorn som medföljer mellan enheten (10) och elnätet.

3 Visa strömstatus

Att kontrollera batteristatus är ett standardförfarande i Windows 11.

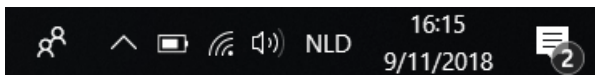

Figur 8. Windows 11-aktivitetsfältet

Välj batteriikonen till höger i Windows 11-aktivitetsfältet. Enhetens återstående batteriladdning visas.

ANMÄRKNING
Om batteriikonen i aktivitetsfältet är dold väljer du först ikonen "visa dolda ikoner" och väljer sedan batteriikonen.

SPETS
Du kan också visa och läsa av batteristatus i Mind Express. Se [Mind Express webbjälp](#).

4 Styrningsalternativ

4.1 Pekskärmsstyrning

Användaren kan anpassa sättet att välja på pekskärmen. Se [Mind Express webbjälp](#).

OBSERVERA
Använd inte vassa verktyg som kan skada pekskärmen.

ANMÄRKNING
Peka med fingret, inte med nageln!

OBSERVERA
Pekskärmen får inte komma i kontakt med vatten.

Använd pekskärmen på följande sätt:

Åtgärd	Teknik
Vänsterklick	Klicka en gång på föremålet med fingret.
Dubbelklicka	Tryck snabbt två gånger på föremålet med fingret.
Dra	För att flytta ett (dragbart) föremål, klicka på föremålet och dra det till önskad plats. Dra fingret (eller muspekaren) från toppen av pekskärmen och nedåt för att avsluta fullskärmsvyn i Mind Express.
Högerklick	Ta försiktigt på pekskärmen med fingret, håll kvar fingret i ett par sekunder och ta sedan bort det. Eller tryck på knappen ESC och tryck sedan på skärmen. För att göra detta måste bakåtknappen vara inställd för detta alternativ.


ANMÄRKNING
Alternativet att dra in kommunikationskort går att ställa in i Mind Express. Se [Mind Express webbjälp](#).

4.2 Musstyrning

Windows-standardfunktioner för enheten och Mind Express kan styras med en mus. Enheten har en USB A-port (16) till vilken du kan ansluta den medföljande musen med en USB A-kabel. Enheten har en USB-C-port (17) till vilken du kan ansluta en mus med en USB-C-kabel. Du kan även använda en USB-A- till USB-C-adapter för att ansluta musen.

**ANMÄRKNING**

För att styra Windows standardfunktioner för enheten och Mind Express kan du också använda en kapacitiv penna, ett fysiskt tangentbord eller ett skärmtangentbord. Det går även att använda en joystick för att styra Mind Express.

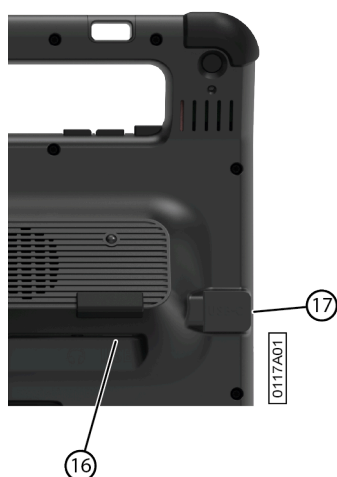


Figur 9. USB-A-port och USB-C-port

**SPETS**

Se [Mind Express webbjälp](#) för mer information om aktivering och inställning av musstyrning i Mind Express.

4.3 Joystickstyrning

Mind Express kan styras med joystick (eller kapacitiv penna, mus, fysiskt tangentbord eller skärmtangentbord). Enheten har en USB-A-port (16) och en USB-C-port (17) till vilken du kan ansluta en joystick.

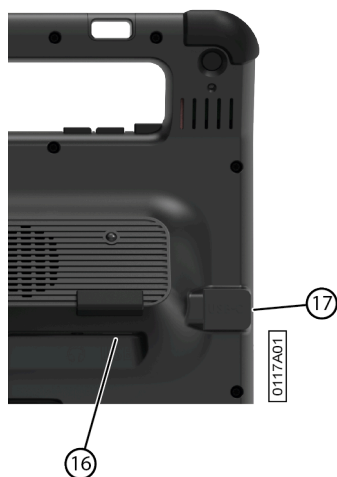

Figur 10. USB-A-port och USB-C-port

**OBSERVERA**

Att styra Windows standardfunktioner med en joystick med hjälp av programvara från tredje part bör undvikas om du vill styra din Mind Express med en joystick.

**SPETS**

Se [Mind Express webbjälp](#) för mer information om aktivering och inställning av joystickstyrning i Mind Express.

4.4 Skanningskontroll

Enheten kan användas i Mind Express genom scanning. I Mind Express kan du ange hur du vill scanna. Omkopplarna (11) (12) kan anslutas till enheten.




Figur 11. Kontakter

- i ANMÄRKNING**
Avsluta skanningsläget genom att trycka och hålla kvar på ESC-knappen (19) under 1,5 sek.
- 💡 SPETS**
Se [Mind Express webbjälp](#) för mer information om aktivering och inställning av scanningsstyrning i Mind Express.

4.5 Tangentbordsstyrning

Windows-standardfunktioner för enheten och Mind Express kan styras med ett fysiskt tangentbord. Enheten har en USB-A-port (16) till vilken du kan ansluta det medföljande tangentbordet med en USB-A-kabel. Enheten har en USB-C-port (17) till vilken du kan ansluta det medföljande tangentbordet med en USB-C-kabel. Du kan även använda en USB-A- till USB-C-adapter för att ansluta tangentbordet.

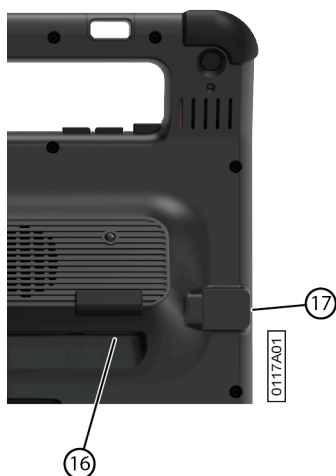


Figur 12. USB-A-port och USB-C-port

- i ANMÄRKNING**
För att styra Windows standardfunktioner för enheten och Mind Express kan du också använda en penna, en mus eller ett skärmtangentbord. Det går även att använda en joystick för att styra Mind Express.

4.6 Använda skärmtangentbordet

Utöver ett USB-tangentbord kan du också använda skärmtangentbordet.

1. Tryck på  i aktivitetsfältet och ange **Skärmtangentbordet** i sökfältet.

2. Öppna **Skärmtangentbordet**-appen.
3. Dra skärmtangentbordet från titelfältet till önskad plats.

**SPETS**

Se hjälpfunktionen för Windows för mer information om skärmtangentbordet.

5 Omgivningskontroll



Figur 13. Den infraröda sändaren och den infraröda mottagaren

Enheten har en infraröd mottagare sändare (17) och en infraröd mottagare (1). De gör det möjligt att styra enheter som TV, radio och DVD-spelare med infraröda koder.

Du kan lära enheten de infraröda koderna.

Under inlärningen håller du enhetens fjärrkontroll (t.ex. TV-apparatens fjärrkontroll) på ett avstånd på omkring 5 cm från enhetens infraröda mottagare. Tryck kort på fjärrkontrollsknappen för den funktion du vill programmera.

Du hittar information om hur de infraröda koderna används och konfigureras i manualen eller online-hjälpen för Mind Express.

6 Ringa och skicka/ta emot textmeddelanden

Med enheten kan du ringa upp och ta emot samtal och skicka och ta emot textmeddelanden via en smarttelefon över Bluetooth.

Mer information finns i [Mind Express webbhjälp](#).



7 Försätta enheten i strömsparläge

Strömsparläget är ett energisparande läge som snabbt låter dig väcka enheten på nytt. Enheten går in i strömsparläget automatiskt. Inställningarna för strömsparläge kan ändras i Windows 11 inställning för energisparfunktioner och strömsparläge. Enheten kan även försättas i strömsparläge manuellt.



Figur 14. Strömbrytaren

Gör ett av följande:

- Välj  >  > **Strömsparläge**.
- Tryck kort på strömbrytaren (9).

Pekskärmen stängs av.

8 Väcka enheten från strömsparläge

Om pekskärmen på enheten är avstängd så är enheten i strömsparläge.



Figur 15. Strömbrytarknapp och väckningssensor

Gör något av följande för att väcka enheten från strömsparläge:

- Tryck på strömbrytaren (9).
- Vidrör väckningssensorn (2) med tummen eller fingret.

i ANMÄRKNING Dessa alternativ är tillgängliga i Windows 11 som standard. Avancerade Windows 11-användare kan ändra dessa inställningar via Enhetshanteraren.

9 Återställa den bakre andra skärmen och högtalare

i ANMÄRKNING Man kan också återställa enheten helt.

! OBSERVERA En återställning är bara tillåten om den andra skärmen och/eller högtalarna inte svarar alls.



Figur 16. Återställningsknappen

1. Tryck in spetsen på en kulspetspenna i återställningsöppningen (18).
2. Starta om Mind Express.

10 Återställa enheten helt



ANMÄRKNING

Om det bara är den andra skärmen och/eller högtalarna som inte svarar kan du återställa dessa separat (se Återställa den bakre andra skärmen och högtalare på sidan 16)



OBSERVERA

Återställ endast enheten helt om den har hängit sig fullständigt.



Figur 17. Strömbrytaren

1. Håll strömbrytaren (9) intryckt tills pekskärmen blir helt mörk och släpp den sedan.
2. Tryck på enhetens strömbrytare igen under några sekunder för att starta om enheten.

11 Stänga av enheten

Välj  >  > Avsluta.

F Inställningar


1 Ställa in volymen






Figur 18. Volymknappar

Utöver kontrollerna i Mind Express och Windows 11 kan du även justera volymen med volymkontrollerna (6) (7).

i ANMÄRKNING Om volymsymbolen inte visas i aktivitetsfältet på Windows 11 väljer du först  i aktivitetsfältet för att visa dolda symboler.

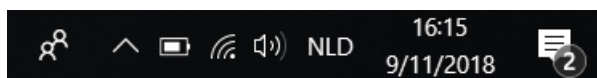

Figur 19. Aktivitetsfält

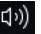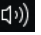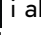
Funktion	Åtgärd med volymkontrollerna	Åtgärd i Windows 11 aktivitetsfält
Öka volymen	Tryck på volymkontrollen (8) tills den önskade volymen uppnås.	Välj volymsymbolen  i aktivitetsfältet och dra skjutreglaget åt höger tills du når önskad volym.
Minska volymen	Tryck på volymkontrollen (7) tills den önskade volymen uppnås.	Välj volymsymbolen  i aktivitetsfältet och dra skjutreglaget åt vänster tills du når önskad volym.
Stänga av ljudet	Tryck på volymkontrollen (7) tills volymen är inställd på 0.	Välj volymikonen  i aktivitetsfältet och flytta på skjutreglaget till vänster tills volymen är inställd på 0.

2 Windows 11 inställningar

De flesta inställningar kan implementeras via standardinställningarna för Windows 11.


2.1 Windows 11-inställningar via aktivitetsfältet

Du kan ställa in de viktigaste parametrarna med aktivitetsfältet längst ner till höger:

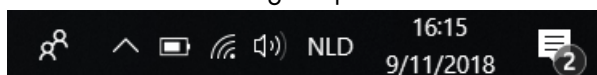

Figur 20. Aktivitetsfält

Om symbolen inte visas i aktivitetsfältet väljer du först  i aktivitetsfältet för att visa dolda symboler. Exempelvis är **Bluetooth**-symbolen  inte synlig i aktivitetsfältet. Klicka på  så visas de dolda symbolerna. Nu kan du välja **Bluetooth**-ikonen .

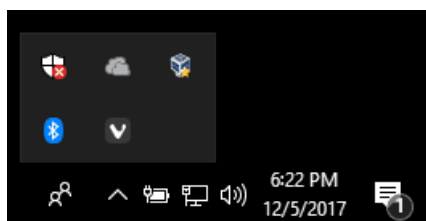

Figur 21. Dolda symboler

- Volym, se också [Ställa in volymen](#) på sidan 18
- Nätverks- och internetinställningar
- Flygplansläge
- **Bluetooth**
- Batteriinställningar
- Visa batteristatus, se också: [Visa strömstatus](#) på sidan 12
- Skärmtangentbord, se också: [Använda skärmtangentbordet](#) på sidan 14


2.2 Windows 11-inställningar via Windows 11 Startknapp

Till vänster om aktivitetsfältet via Windows-ikonen **Starta**  > **Inställningar**  hittar du omfattande inställningar och du kan också söka efter inställningar med sökfönstret överst på skärmen Inställningar.

2.3 Windows 11 inställningar för strömsparläge


- Försätta enheten i strömsparläge, se [Försätta enheten i strömsparläge](#) på sidan 15.
- Väcka enheten från strömsparläge, se [Väcka enheten från strömsparläge](#) på sidan 16.
- Stänga av strömsparläge, se [Inaktivera strömsparläge](#) på sidan 19.

3 Inaktivera strömsparläge

1. Klicka på **Starta**  och sök efter **Kontrollpanelen > Energialternativ**.
2. Välj **Ändra datorinställningarna för strömsparläge** till vänster.
3. Välj **Aldrig** i listrutan **Försätt datorn i strömsparläge efter:**.

4 Ställa in knappen på enhetens baksida



ESC-knappen kan användas för att skapa ett höger musklick och en Escape. **ESC**-knappen kan även stängas av.

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. I alternativgruppen **Preferences**, välj ett av följande alternativ i listrutan **Back button:**

Alternativ	Förklaring
<Disabled>	Den här knappen har stängts av så den kommer inte att svara.
Long press=Escape	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på och håll ned (ungefär 1,5 sekunder) denna knapp för att simulera ESC. Detta låter dig till exempel stoppa en skanningsalgoritm i Mind Express, eller visa menyraden på nytt.


3. Klicka på **OK**.

5 Att välja språk för verktyget

1. Gör ett av följande:
 - Högerklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfält.
 - Tryck på  i systemfältet i Windows aktivitetsfält och fortsätt att trycka tills snabbmenyn visas.
2. Välj **Choose language** i snabbmenyn.
3. Välj önskat språk.


6 Ställa in omkopplarna

Du kan koppla en åtgärd till kontakterna. Åtgärden utförs då genom att kontakten trycks in. Exempel: vänsterklick, högerklick, skicka bokstav eller siffra osv.

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. I alternativgruppen **Preferences**, välj ett av följande alternativ i listrutan **Switch 1:**
 - **<Normal>**, omkopplaren tilldelas funktionen som har ställts in i Mind Express.
 - **Leftclick**, omkopplaren utför den vänstra knappens funktion.
 - **Rightclick**, omkopplaren utför den högra knappens funktion.
 - en tangent (alfanumeriska tangenter, navigeringstangenter, numeriska tangenter och funktionstangenter), omkopplaren utför tangentens åtgärd.
3. Upprepa steg 2 för att ställa in **Switch 2:**.
4. Klicka på **OK**.


7 Inställningar för väckning från strömsparläge genom pekning

Du kan ställa in om du vill att enheten ska kunna väckas från strömsparläge genom beröring. Du gör det genom att aktivera eller inaktivera väckningssensorn.


1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. Gör ett av följande:
 - Välj alternativet **Wakeup when pressing wakeup sensor** för att aktivera väckningssensorn. Du kan väcka enheten från strömsparläge genom att beröra platsen för väckningssensorn.
 - Inaktivera alternativet **Wakeup when pressing wakeup sensor** för att inaktivera väckningssensorn. Du KAN INTE väcka enheten från strömsparläge genom att beröra platsen för väckningssensorn.

8 Slå på eller av högtalarna

När enheten slås på är högtalarna som standard påslagna.

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. Markera alternativet **Speakers** för att slå på högtalarna och avmarkera alternativet för att stänga av högtalarna.

9 Slå på eller av hörlurarna

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. Markera alternativet **Headphones** för att slå på hörlurarna och avmarkera alternativet för att stänga av hörlurarna.

G Underhåll och felsökning

1 Underhåll

1.1 Reparationer

I händelse av skada på enheten kontakta enhetens distributör.

Försök inte att reparera enheten själv. Detta kan skada enheten och upphäva garantin.

1.2 Rengöra enheten

Rengör enheten regelbundet så att bakterier inte får chansen att sprida sig.

Det är bäst att avlägsna damm med en torr, mjuk trasa. Ta bort småfläckar på höljet med en fuktig trasa. Använd inte produkter som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel. Låt inte fukt tränga in i öppningarna (t.ex. mikrofonens eller anslutningarnas öppningar). Smuts nära kontakterna går att ta bort med en bomullspinne.

Använd också en torr trasa för att rengöra skärmarna. Använd inte hushållspapper eftersom detta kan repa. Ta bort fett eller fläckar på skärmarna med rengöringsmedel avsedda för rengöring av bildskärmar (spray eller duk). Tryck inte för hårt mot skärmarna när du rengör.

Om enheten har ett tangentbord eller om ett tangentbord medföljer enheten rengör du tangentbordet med rengöringsmedel som är särskilt avsedda för detta ändamål. Använd alltid en fuktig trasa för detta.


Om enheten har en bärväska rengör du bärväskan med en torr eller lätt fuktad trasa, eller en mjuk handborste.

2 Felsökning

2.1 Hitta enhetens serienummer


När du kontaktar supportavdelningen ombeds du ange serienumret för din enhet.

Du hittar etiketten med enhetens serienummer på enhetens bakre panel.

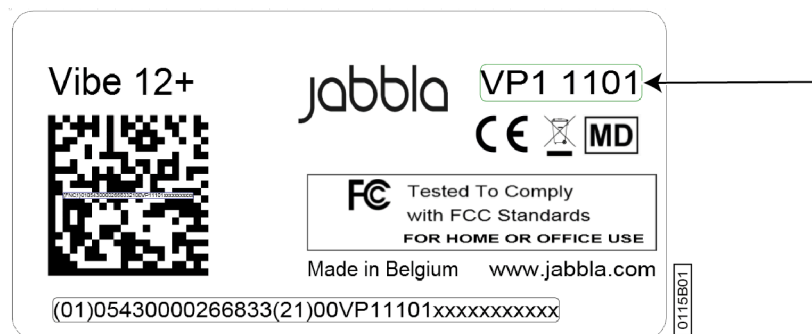



Figur 22. Serienummer

2.2 Frågor om versionsinformation

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. Läs upp alla versionsnummer nedan som supportpersonalen kan behöva.

2.3 Visa licensinformation för Mind Express

Du kan visa serienumret, versionen, samtalsapparatkoden, alternativ ...

1. Välj  **Meny** >  **Inställningar**.
2. Välj  **System**.

Fliken **Inställningar** visas.

3. Välj fliken **Licens**.


Licensinformationen visas.

2.4 Felsökning

Problem	Lösning
Pekskärmen är långsam eller fungerar inte ordentligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Starta om enheten för att rätta till eventuella programvarufel. • Rengör pekskärmen. Se Rengöra enheten på sidan 21.
Windows kontrollsystem svarar inte.	Håll strömbrytaren intryckt tills enheten stängs av och startas om. Se även Återställa enheten helt på sidan 17.
Den andra skärmen och/eller de bakre högtalare svarar inte längre.	Återställ den bakre andra skärmen och högtalaren. Se Återställa den bakre andra skärmen och högtalare på sidan 16.
Enheten börjar bli varm.	Enheten kan bli varm vid lång och intensiv användning. Det är normalt och påverkar inte enhetens prestanda.
Det går inte att hitta Bluetooth-enheter.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på enheten du vill ansluta till. • Kontrollera att din enhet och de andra apparaten är inom det maximala avståndet på tio meter. • Ta om nödvändigt bort föremål mellan enheten och den andra apparaten. • Det kan hända att den andra apparaten inte är kompatibel med din enhet.
Det går inte att slå på enheten.	Batteriet är otillräckligt uppladdat för att kunna starta enheten. Anslut nätadaptern och slå på enheten.
Batteriet laddas inte ordentligt.	Kontakta supportavdelningen för den distributör där du köpte enheten om batteriet inte längre går att ladda till 90 %.
Det kommer inget ljud från högtalarna.	Kontrollera att högtalarna är på. Se Slå på eller av högtalarna på sidan 20.
Det kommer inget ljud från hörlurarna.	Kontrollera att hörlurarna är på. Se Slå på eller av hörlurarna på sidan 20.

2.5 Testa kontakterna

Du kan utföra ett test för att kontrollera huruvida kontakterna har anslutits korrekt och fungerar som de ska.

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. Tryck på kontakt 1.
Om den fungerar korrekt kommer ljuset i den vänstra cirkeln att vara grönt.




3. Tryck på kontakt 2.
Om den fungerar korrekt kommer ljuset i den högra cirkeln att vara grönt.



4. Klicka på **OK**.

2.6 Testa väckningssensorn

För att kontrollera att väckningssensorn fungerar korrekt kan du testa den.

1. Dubbelklicka på  i systemfältet i Windows aktivitetsfältet.
2. Vidrör platsen för väckningssensorn.
Om den fungerar korrekt kommer ljuset i cirkeln att vara grönt.



3. Klicka på **OK**.

H Avveckling och kassering

1 Avveckling

1. Stäng av enheten.
2. Ta av enheten från monteringen (i förekommande fall).
3. Ta ut enheten ur bärväskan (i förekommande fall).
4. Ta bort laddaren.

2 Kassering

Kasta inte enheten i hushållssoporna!

Använd specifika insamlingssystem för att minska miljöpåverkan. Mot slutet av livslängden måste enheten demonteras och kasseras på ett miljövänligt sätt. Följ gällande lokala lagkrav och kontakta de lokala myndigheterna om du är osäker.

Om enheten är utrustad med ett icke-utbytbart uppladdningsbart batteri får det endast avlägsnas av en kompetent fackman.

Om enheten är utrustad med ett utbytbart uppladdningsbart batteri kan det tomma batteriet kasseras på en återvinningscentral.

Använda batterier betraktas som kemiskt avfall. Enligt lokal lagstiftning är det förbjudet att kasta batterier tillsammans med annat industriellt avfall eller hushållsavfall.



Ett överkryssat sopkärl visas på enhetens etikett för att uppmana användare:

- att inte kasta produkten som hushållsavfall.
- att återvinna produkten och dess komponenter när så är möjligt.
- att kasta produkten på en återvinningscentral.

Korrekt kassering av dessa produkter bidrar till människors hälsa och miljön!

Om du har några frågor om hur man kasserar produkten kan du kontakta:

- enhetens distributör
- lokala myndigheterna där du bor
- myndigheten för avfallshantering

Index

A

- Aktivera
 - enhet 11
- Alternativ 8
 - visa tillgängliga och icke-aktiverade 21
- Andra display
 - rengöra 21
- Andra skärm
 - återställa 16
- Ange språk 20
- Använda
 - enhet 3
- Användning
 - enhet 8
 - förbjuden 3
- Användning första gången 10
- Avsedd användning 3
- Avveckling 24

B

- Batteri
 - kassering 24
 - ladda 11
 - status 12
 - tekniska data 4
- Batteristatus
 - visa i Windows 11 18
- Behåll 10
- Beskrivning 6
- Bluetooth
 - ställ in i Windows 11 18
- Brickstativ 6
- Bärväska 10
 - rengöring 21

D

- DAESSY 4, 8
 - monteringsplatta 6
- Delar 10

E

- Enhet 21
- Enhetskod
 - visa 21
- Escape 19
 - knapp 6
- Etikett 3

F

- Fel 22

- Flygläge
 - ställ in i Windows 11 18
- Funktion
 - enhet 3
 - förbjuden 3
- Förbjuden användning 3

H

- Hårddisk 4
- Hårdvara
 - ställ in i Windows 11 19
- Högerklick 19
- Högtalare 6
 - slå på eller av 20
 - ställ in i Windows 11 18
 - ställ in med volymkontrollen 18
 - stäng av 18
 - återställa 16
- Hörlur
 - uttag 6
- Hörlurar
 - slå på eller av 20

I

- Identifieringsskylt 3
- Inaktivera
 - enhet 17
- Ingår 10
- Inledning 3, 3
- Inställningar 18
 - högtalare/volym 18
 - Windows 11 19
- Internt minne 4

J

- Joystick 13

K

- Kamera 6
 - siffror 6
 - ställ in i Windows 11 19
- Kassering 24
- Knapp
 - escape 6
 - strömbrytare 6
 - ställ in knapp på enhetens baksida 19
 - volym 6
 - återställ 6
- Komma igång 10

Kontakt
testa 22

Kontroll
omkopplare 13
scanning 13

Kringutrustning
via USB A-port 6
via USB-C-port 6

L

Ladda
batteri 11
nätadapteranslutning 6

Lagra 10

Licens 10
visa information 21

Livslängd 3

Ljud 4

M

Mikrofon 6
ställ in i Windows 11 19

Mind Express 10

Minne 4

Monteringsplatta 6
tekniska data 4

Mus 10, 12

Mått 4

N

Nätadapter 10
anslutning 6

O

Omgivningskontroll 15

Omkopplare
ange 20
kontroll 13
tekniska data 4

Operativsystem 4

P

Peka
inställningar 20

Pekskärm
rengöra 21
styrning 8
tekniska data 4

PIC 21

Problem 22

Processor 4

R

RAM-minne 4

REHADAPT 4, 8
monteringsplatta 6

Rem 10

Rengöra 21

Reparation 21

Ringa 15

Ringa telefonsamtal 15

S

Scanning
kontroll 13

Sensor
testa 23

Serienummer
enhet 21
etikett 3
QR-kod 3

Skicka textmeddelanden 15

Skärm 6
rengöra 21
siffra 6
styrning 8, 12
tangentbord 14
tekniska data 4

Slå på
enhet 11
högtalare/volym 18

Spara 10

Specifikationer
tekniska data 4

SSD (Solid state-hårddisk) 4

Starta
enhet 11

Stativ 6

Strömbrytare
knapp 6

Strömsparläge
gå in i strömsparläge 15
inaktivera 19
inställt på Windows 11 19
testa väckningssensor 23
väcka från strömsparläge 16
väcka från strömsparläge inställningar 20

Styrning 11
fysiskt tangentbord 14
joystick 13
mus 12
pekskärm 12
skärmtangentbord 14

Stäng av
högtalare/volym 18

Stänga av
enhet 17

Säkerhet 9

T

Tangentbord 10
fysiskt 14
på skärmen 14

Tekniska data 4

Tillbehör 8, 10

U

- Underhåll 21
 - rengöra 21
 - reparation 21
- USB
 - tekniska data 4
 - USB A-port 6
 - USB-C-kontakt 6
- USB-minne 10

V

- Verktyg
 - ange språk 20
- Version 21
 - visa 21
- Vikt 4
- Volym
 - knapp 6
 - minska 6
 - ställ in i Windows 11 18
 - ställ in med volymkontrollen 18
 - stäng av 18
 - öka 6
- Väckningssensor
 - inställningar 20
 - testa 23
 - väcka enheten från strömsparläge 16

W

- Webbkamera
 - ställ in i Windows 11 19
 - tekniska data 4
- Webcam
 - siffror 6
- Wi-Fi
 - ställ in i Windows 11 18
- Windows 11
 - inställningar 19
 - återställ 17
- Windows 11-
 - problem 22

Å

- Återställ
 - hela enheten 17
- Återställning
 - andra skärm 16
 - bakre högtalare 16
 - knapp 6
- Åtgärd
 - länka till omkopplare 20

jabbla
We all have a voice

www.jabbla.com